

# V-Chromer® III

Автоматический стейнер для окраски



# Стандартизованная окраска микроскопических препаратов

## Автоматизация окраски препаратов Настраиваемые протоколы окраски

### Применение

Цитология  
Гематология  
Микробиология  
Гистология

### Протоколы окраски

Папаниколау  
Паппенгейм  
Лейшман  
Романовский-Гимза  
Циль-Нильсен  
Грам и другие

### Преимущества V-Chromer® III

- Открытая система для использования красок различных производителей
- Одновременная загрузка нескольких держателей со слайдами
- Одновременная окраска по нескольким протоколам
- Совместим с аппаратами для заключения под покровные стекла
- Дисплей для управления процессом окраски
- Нейтрализация испарений и запахов благодаря угольному фильтру
- Не требуется вытяжной шкаф
- Защита персонала при работе с красящими веществами

### Высокая производительность




Загрузка до 30 слайдов в штатив



До 18 доступных емкостей для реагентов

# Универсальный автоматический мультитейнер

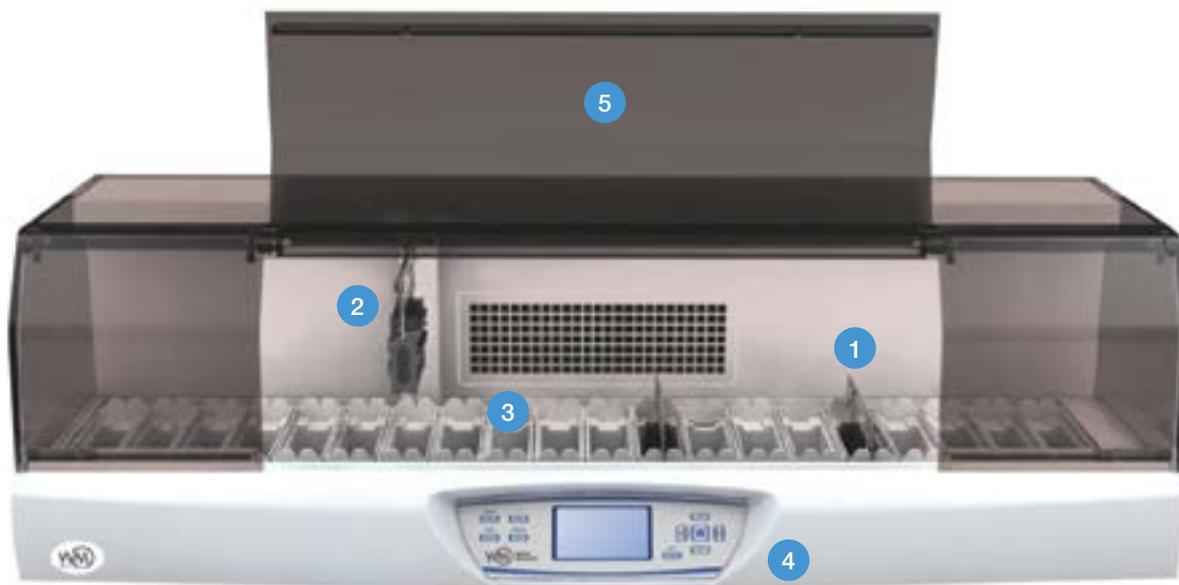

- 1 штатив со стеклами
- 2 держатель штативов
- 3 емкость для реагентов
- 4 дисплей и клавиши управления
- 5 секционная дверца

## Окрашивание проводится в 3 простых действия



Поместите слайды в держатель стейнера



Запустите автоматический цикл покраски



Получите стандартизованно окрашенные препараты

# Спецификации

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Реагенты</b>                  | открытая система для использования красок различных производителей   |
| <b>Загрузка слайдов</b>          | одновременная загрузка до 5 держателей, до 30 слайдов каждый         |
| <b>Количество программ</b>       | до 2 одновременно используемых программ, каждая до 50 этапов окраски |
| <b>Количество реагентов</b>      | до 52 (32 предустановленных и 20 настраиваемых)                      |
| <b>Время окраски</b>             | от 1 секунды до 59 минут 59 секунд на каждый этап окраски            |
| <b>Общее количество емкостей</b> | 20   |
| <b>Емкости для реагентов</b>     | до 18, объем 300 мл  |
| <b>Емкости для промывки</b>      | до 3   |
| <b>Емкости для сушки</b>         | 1, температура 30–70 °C  |
| <b>Поглощение испарений</b>      | встроенная система поглощения испарений/запахов с угольным фильтром  |
| <b>Питание</b>                   | 100–240 В / 50–60 Гц   |
| <b>Питание от батареи</b>        | до 2 часов   |
| <b>Дисплей</b>                   | ЖК, 4/3 дюйма  |
| <b>Тип прибора</b>               | мультистейнер  |

## Информация для заказа

|   |            |
|---|------------|
| <b>V-Chromer® III</b><br>Автоматический мультистейнер | 80.0003.03 |
|---|------------|

Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.



Manufacturer:  
West Medica Produktions- und Handels-GmbH  
Brown-Boveri-Straße 6, B17-1, 2351 Wiener Neudorf, Austria  
tel.: +43 (0) 2236 892465, fax: +43 (0) 2236 892464  
vienna@westmedica.com, www.westmedica.com

